

THE COMFORT CLUB BLOND OOGDRUPPELS MET HYALURON

Deze oogdruppels bieden extra comfort en lubricatie bij milde irritatie van de ogen.
Geschikt om te gebruiken in combinatie met alle contactlenzen.

MEDISCH HULPMIDDEL

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, er staat belangrijke informatie in over het gebruik van dit medische hulpmiddel.

SAMENSTELLING

Sodium Chloride, Disodiumedetate Dihydrate, Disodiumhydrogen-phosphate Dihydrate, Sodiumdihydrogenphosphate Monohydrate, Hyaluronzuur 0,1%, gezuiverd water. Conserveermiddel: vrij van conserveermiddelen.

TOEPASSING

Deze op Hyaluronzuur gebaseerde oogdruppels bieden comfort en hydratatie. Door onder andere computergebruik en/of airconditioning kunnen uw ogen droger gaan aanvoelen. Deze oogdruppels bieden daarbij extra comfort.
Geschikt om te gebruiken in combinatie met contactlenzen (hard en zacht).

VOORZORGMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

Was en droog uw handen.

Verwijder de garantiesluiting. (Zie afbeelding 1)

Neem de beschermdop van het flesje (zie afbeelding 2) en houd uw hoofd iets achterover.

Gebruik uw duim en vinger om uw oog open te houden. (Zie afbeelding 3)

Knijp voorzichtig 1-2 druppels uit het flesje op het oogoppervlak en knipper een aantal keer. (Zie afbeelding 4)


Herhaal dit proces bij het andere oog.

Knipper een aantal keer met uw ogen, zodat de oogdruppels zich verspreiden in uw oog.

De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

Het flesje na gebruik direct sluiten, voorkom knippen bij het afsluiten. (Zie afbeelding 5)

The Comfort Club BLOND kan direct worden toegepast op alle soorten contactlenzen. Knipper daarna een aantal keer met uw ogen, zodat de oogdruppels zich verspreiden in uw oog.

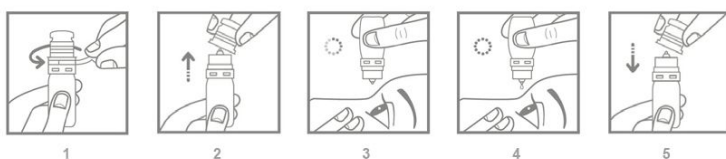

WAARSCHUWINGEN

Na het aanbrengen van de druppels dient er rekening te worden gehouden met tijdelijke verandering van het gezichtsvermogen.

NIET GEBRUIKEN

Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is bij het eerste gebruik.

Niet gebruiken indien het product zichtbaar beschadigd is.

Niet gebruiken als u last heeft van een ooginfectie.

Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club BLOND niet gebruiken.

Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze oogdruppel.

Staak het gebruik van dit product indien de mate van oogirritatie toeneemt en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

Eén flesje niet gebruiken voor meerdere personen.

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

BEWAREN

Buiten het bereik van kinderen houden. (afbeelding A)

Bewaren tussen 4 °C en 25 °C. (afbeelding B)

Bescherm tegen zonlicht. (afbeelding C)

Bewaren in de originele verpakking. (afbeelding D)

Na openen 12 weken houdbaar. (afbeelding E)



Ote Pharma Sol BV
Vluchtoord 38
NL- 5406 XP Uden

01REF1983
05/2021

CE 0344

STERILE A