



The Comfort Club®

voor gebruik met **alle** contactlenzen

**BRASS**



100ML **ZOUTOPLOSSING**

**THE COMFORT CLUB BRASS GEBUFFERDE, ISOTONE NATRIUMCHLORIDE OPLOSSING. ISOTONE VLOEISTOF VOOR SPOELEN EN INZETTEN. VOOR ALLE CONTACTLENZEN.**

**MEDISCH HULPMIDDEL**

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club BRASS.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING** Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. Flacon na gebruik sluiten.

**WAARSCHUWINGEN** Niet gebruiken indien de garantiesluiting verbroken is. Gebruik of meng The Comfort Club BRASS niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

**NIET GEBRUIKEN** Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

**BEWAREN** Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 2 maanden houdbaar.

**BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club BRASS niet gebruiken.

**SAMENSTELLING** Werkzaam bestanddeel: natriumchloride, EDTA. Conserveermiddel: vrij van conserveermiddelen.

**INHOUD** 100 ml



Ote Pharma Sol BV  
Vluchtoord 38  
NL- 5406 XP Uden



**LOT**



**CE**

0344



Zie onderzijde  
van de fles



8

**STERILE A**

02REF058001051  
05/2021