



The **Comfort Club**®

Voor gebruik met **harde** contactlenzen

**CORN**



200ML **ALLES-IN-1** VLOEISTOF

**THE COMFORT CLUB CORN ALLES-IN-1 VLOEISTOF VOOR GEBRUIK MET HARDE CONTACTLENZEN. VOOR REINIGEN, DESINFECTEREN, BEWAREN EN INZETTEN.**

**MEDISCH HULPMIDDEL**

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club CORN.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING** Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien. Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met ongeveer 8 druppels The Comfort Club CORN. Reinig de lenzen door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 30 seconden te masseren. Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 6 uur in de lenshouder gevuld met verse The Comfort Club CORN. Na desinfectie kunt u de lenzen direct inzetten. Spoei de lenshouder af met The Comfort Club CORN en laat de lenshouder drogen aan de lucht. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. De flacon na gebruik direct sluiten.

**OVERIGE AANWIJZINGEN** Na bewaring gedurende meer dan 30 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. Vervang regelmatig uw lenshouder om infectie door vervuiling te voorkomen.

**WAARSCHUWINGEN** Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is. Gebruik of meng The Comfort Club CORN niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlens verzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

**NIET GEBRUIKEN** Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

**BEWAREN** Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 4 maanden houdbaar.

**BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club CORN niet gebruiken.

**SAMENSTELLING** Werkzame bestanddelen: polysorbaat 80, HPMC, Conserveermiddel: PHMB 0,0002%.

**INHoud** 200 ml



Ote Pharma Sol BV  
Vluchtoord 38  
NL- 5406 XP Uden



**LOT**



Zie onderzijde  
van de fles

**CE**  
0344

**STERILE A**



8