



# The Comfort Club<sup>®</sup>

voor gebruik met **zachte** contactlenzen

## GOLD



300ML **ALLES-IN-1** VLOEISTOF

(TRADE NAME) IS EEN HOOGWAARDIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK VERZORGINGSSYSTEEM ZONDER CONSERVEER-MIDDELEN. VOOR DESINFECTEREN EN BEWAREN. VOOR ALLE ZACHT CONTACTLENZEN WAARONDER SILICONEHY-DROGEL LENZEN.

**GEBRUIKSAANWIJZING** Zorg ervoor dat voor gebruik de platina schijf is gemonteerd in de lenshouder, omdat dit essentieel is voor de neutralisatie van de peroxide. (Trade name) oplossing moet altijd worden gebruikt in combinatie met de (Trade name) lenshouder met een platina schijf.

Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. Plaats uw linkerlens in het met "L" gemarkeerde bolvormige korfje van de lenshouder. Sluit vervolgens het korfje. De rechterlens in het rechterkorfje plaatsen en vervolgens sluiten. Spoel de lenzen grondig af in de korfjes met (Trade name) gedurende 5 seconden. Vul dan de (Trade name) lenshouder met (Trade name) vloeistof tot de streep. Belangrijk: let goed op dat niet te veel of te weinig gebruikt wordt. Bij overvulling kan de vloeistof overschuimen; bij te weinig vloeistof bestaat kans op onvolledige desinfectie. Gebruik altijd verse vloeistof bij iedere desinfectiecyclus. Plaats vervolgens de dop op de lenshouder en draai deze vast. De lenshouder niet schudden. Door het schudden kunnen resten waterstofperoxide zich hechten aan de binnenkant van de deksel. Bij het inzetten van de lenzen kunnen deze resten een sterk branderig of prikkend gevoel veroorzaken. In dit geval direct de ogen spoelen met veel en schoon water. Laat de lenzen ten minste 6 uur of gedurende de nacht ondergedompeld staan om de oplossing te neutraliseren. Neem uw lenzen uit de lenshouder. De lenzen kunnen nu ingezet en gedragen worden. Het is aan te bevelen voor het inzetten van de lenzen de lenzen met Saline af te spoelen. Gooi de gebruikte vloeistof altijd direct weg. Vervolgens de lenshouder en de platina schijf goed met Saline afspoelen; gebruik NOOIT leidingwater. Afspoelen van de schijf is ook noodzakelijk om vuilresten te verwijderen, die, indien nog aanwezig op de schijf, de neutralisatie van de (Trade name) vloeistof kunnen beïnvloeden. De lenshouder en schijf laten drogen aan de lucht (niet drogen met een doek).

**WAARSCHUWINGEN** (Trade name) peroxide vloeistof is geen multipurpose vloeistof. Breng de peroxideoplossing niet rechtstreeks in uw oog aan. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren tussen 4 °C en 25 °C. In geval van oogirritatie staak het gebruik en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist. Controleer of de garantiesluiting ongeschonden is. Na openen 3 maanden houdbaar of na 35 desinfecties de fles en lenshouder weggooien. Let goed op dat u geen lenzen in het oog plaatst uit (Trade name) vloeistof die niet helemaal geneutraliseerd is. Ongeneutraliseerde (Trade name) vloeistof is een desinfecteringsproduct dat in het oog een branderig en sterk prikkend gevoel veroorzaakt. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Belangrijk: na iedere gebruikte flacon altijd een nieuwe platina neutralisatieschijf nemen. Vermijd regelmatig vingercontact met de platina schijf. Vingers kunnen vetsporen achterlaten, waardoor de neutraliserende werking van de schijf kan verminderen. De geneutraliseerde oplossing in de lenshouder is niet conserveerbaar. Indien de lenzen langer dan 24 uur in de oplossing staan, is het aan te bevelen de lenzen wederom te desinfecteren. Indien per ongeluk (Trade name) vloeistof wordt ingenomen, direct grote hoeveelheden water drinken en uw (huis) arts raadplegen.

**BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen (Trade name) niet gebruiken. (Trade name) nooit gebruiken voor hittedesinfectie.

**SAMENSTELLING** De conserveermiddelvrije, waterige (Trade name) oplossing bevat waterstofperoxide 3% (ontsmettingsmiddel), fosfonzuur (stabilisator), natriumchloride (middel voor het aanpassen van de osmolaliteit), fosfaat (buffer systeem).

**FABRIKANT**  
Ote Pharma Sol BV  
Vluchtoord 38  
NL- 5406 XP Uden



0344



BARCODE AREA

01REF058003669  
12-2018