



The Comfort Club®

voor gebruik met **zachte** contactlenzen

GOLD



100ML ALLES-IN-1 VLOEISTOF

THE COMFORT CLUB GOLD ALLES-IN-1 VLOEISTOF MET HYALURONAAAT VOOR REINIGEN, VERWIJDEREN VAN PROTEÏNEAANSLAG, DESINFECTEREN, AFSCOEPEN, BEWAREN, INZETTEN EN BEVOCHTIGEN. VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.

MEDISCH HULPMIDDEL

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club GOLD.

VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenz houder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien. Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met enkele druppels The Comfort Club GOLD. Reinig de lenzen door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 10-15 seconden te masseren. Spoel de lenzen af met The Comfort Club GOLD. Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 6 uur in de lenz houder gevuld met verse The Comfort Club GOLD. Haal de lenzen na de desinfectiecyclus uit de lenz houder, spoel de lenzen met The Comfort Club GOLD af en zet de lenzen in uw ogen. Spoel de lenz houder af met The Comfort Club GOLD en laat de lenz houder drogen aan de lucht. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. De flacon na gebruik direct sluiten.

OVERIGE AANWIJZINGEN Na bewaring gedurende meer dan 7 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. Vervang regelmatig uw lenz houder om infectie door vervuiling te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is. Gebruik of meng The Comfort Club GOLD niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenz houder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

NIET GEBRUIKEN Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

BEWAREN Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 3 maanden houdbaar.

BIJWERKINGEN Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club GOLD niet gebruiken.

SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: Hyaluronaat
Conserveermiddel: PHMB 0,00002%, Polyquaternium 0,00065%

INHOUD 100 ml



Ote Pharma Sol BV
Vluchtoord 38
NL- 5406 XP Uden
02REF058001067
05/2021



LOT



Zie onderzijde
van de fles

CE
0344



7 19214 646127

8

STERILE A