



# The Comfort Club®

voor gebruik met **zachte** contactlenzen

## GOLD



300ML **ALLES-IN-1** VLOEISTOF

**THE COMFORT CLUB GOLD ALLES-IN-1 VLOEISTOF MET HYALURONAAAT VOOR REINIGEN, VERWIJDEREN VAN PROTEÏNEAANSLAG, DESINFECTEREN, AFSPOELEN, BEWAREN, INZETTEN EN BEVOCHTIGEN. VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.**

#### MEDISCH HULPMIDDEL

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club GOLD.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING** Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien. Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met enkele druppels The Comfort Club GOLD. Reinig de lenzen door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 10-15 seconden te masseren. Spoel de lenzen af met The Comfort Club GOLD. Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 6 uur in de lenshouder gevuld met verse The Comfort Club GOLD. Haal de lenzen na de desinfectiecyclus uit de lenshouder, spoel de lenzen met The Comfort Club GOLD af en zet de lenzen in uw ogen. Spoel de lenshouder af met The Comfort Club GOLD en laat de lenshouder drogen aan de lucht. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. De flacon na gebruik direct sluiten.

**OVERIGE AANWIJZINGEN** Na bewaring gedurende meer dan 7 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. Vervang regelmatig uw lenshouder om infectie door vervulling te voorkomen.

**WAARSCHUWINGEN** Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is. Gebruik of meng The Comfort Club GOLD niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

**NIET GEBRUIKEN** Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

**BEWAREN** Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 3 maanden houdbaar.

**BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club GOLD niet gebruiken.

**SAMENSTELLING** Werkzaam bestanddeel: Hyaluronaat  
Conserveermiddel: PHMB 0,00002%, Polyquaternium 0,00065%

**INHOUD** 300 ml

  
Ote Pharma Sol BV  
Vluichtoord 38  
NL-54065 XP Uden  
02REF058003067  
05/2021



LOT



Zie onderzijde  
van de fles



CE  
0344



STERILE A