



The Comfort Club®

voor gebruik met **zachte** contactlenzen

**KHAKI**



100ML **ALLES-IN-1** VLOEISTOF

**THE COMFORT CLUB KHAKI ALLES IN ÉÉN VLOEISTOF MET PRO-VITAMINE B5 VOOR HET REINIGEN, DESINFECTEREN, BEWAREN, BEVOCHTIGEN, AFSPOELEN, VERWIJDEREN VAN PROTEÏNE-AANSLAG EN OOGVERZORGING. VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.**

#### MEDISCH HULPMIDDEL

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club KHAKI.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING** Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. Spoel de lenzen zorgvuldig af met The Comfort Club KHAKI en plaats ze in de lenshouder. Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 4 uur in de lenshouder gevuld met verse The Comfort Club KHAKI. Haal de lenzen na de desinfectiecyclus uit de lenshouder, spoel de lenzen met The Comfort Club KHAKI af en zet de lenzen in uw ogen. Spoel de lenshouder af met The Comfort Club KHAKI of een Natriumchloride-oplossing en laat de lenshouder drogen aan de lucht. Heeft u tijdens het dragen last van kleine irritaties, breng dan een druppel The Comfort Club KHAKI aan op het oog en knipper enkele malen. U kunt uw lens in het oog houden. Bij aanhoudende klachten: raadpleeg uw contactlensspecialist. Reinigen in het geval van sterke proteïne-aanslag: plaats de lens in de palm van de hand. Plaats enkele druppels The Comfort Club KHAKI op de lens en wrijf de lens schoon. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. De flacon na gebruik direct sluiten.

**OVERIGE AANWIJZINGEN** Na bewaring gedurende meer dan 7 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. Vervang regelmatig uw lenshouder om infectie door vervuiling te voorkomen.

**WAARSCHUWINGEN** Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is. Gebruik of meng The Comfort Club KHAKI niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

**NIET GEBRUIKEN** Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

**BEWAREN** Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 2 maanden houdbaar.

**BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club KHAKI niet gebruiken.

**SAMENSTELLING** Werkzaam bestanddeel: Poloxamine 0,5%, HydraFlex 0,003%, Provitamin B5 1,5%. Conserveermiddel: Polyhexanide 0,0001%.

**INHOUD** 100 ml



Ote Pharma Sol BV  
Vluchtoord 38  
NL- 5406 XP Uden  
01REF058001046  
06/2021



**LOT**



Zie onderzijde  
van de fles



**CE**  
0344



8 717185 942200

**STERILE A**