



The Comfort Club®

voor gebruik met **zachte** contactlenzen

**LAGUNA**



100ML **ALLES-IN-1** VLOEISTOF

**THE COMFORT CLUB LAGUNA ALLES IN ÉÉN VLOEISTOF VOOR REINIGEN VAN EIWITAFZETTING EN VETAANSLAG, DESINFECTEREN, INZETTEN EN BEWAREN. VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.**

**MEDISCH HULPMIDDEL**

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club LAGUNA.

**VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING** Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien. Direct na het uitnemen van de lenzen beide zijden van de lens grondig spoelen met The Comfort Club LAGUNA. Plaats de lenzen in de met The Comfort Club LAGUNA gevulde lenshouder en schud deze gedurende tenminste 15 seconden. Om de lenzen te desinfecteren plaatst u deze gedurende minimaal 4 uur in de lenshouder gevuld met verse The Comfort Club LAGUNA. Spoel vervolgens beide zijden van de lens met The Comfort Club LAGUNA. Hierna kunt u de met The Comfort Club LAGUNA bevochtigde lenzen inzetten. Spoel de lenshouder af met The Comfort Club LAGUNA en laat de lenshouder drogen aan de lucht. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. De flacon na gebruik direct sluiten.

**OVERIGE AANWIJZINGEN** Na bewaring gedurende meer dan 7 dagen moeten de lenzen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. Vervang regelmatig uw lenshouder om infectie door vervuiling te voorkomen.

**WAARSCHUWINGEN** Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is. Gebruik of meng The Comfort Club LAGUNA niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlens verzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof.

**NIET GEBRUIKEN** Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

**BEWAREN** Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 4 maanden houdbaar.

**BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club LAGUNA niet gebruiken.

**SAMENSTELLING** The Comfort Club LAGUNA is een gebufferde, isotonische oplossing welke het volgende werkzame bestanddeel bevat: Remopro. Conserveermiddel: PHMB 0,0001%.

**INHOUD** 100 ml



Ote Pharma Sol BV  
Vluchtoord 38  
NL- 5406 XP Uden  
01REF058001042  
06/2021



**LOT**



Zie onderzijde  
van de fles

**CE**  
0344



8

**STERILE A**