

## THE COMFORT CLUB PINEAPPLE HYDRACLAIR

The Comfort Club PINEAPPLE Hydraclair is een heldere, steriele, viskeuze, bevochtigende en voedzame oplossing gebaseerd op provitamine B5. Het ingrediënt provitamine B5 stimuleert en ondersteunt de zelf genererende eigenschappen van de cornea. Met dank aan het muco-klevend vermogen van HydraFlex blijft de traanfilm behouden zodat het oog beter beschermd is. Dit product bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong.

The Comfort Club PINEAPPLE Hydraclair beschermt het oog tegen klachten zoals een droog gevoel en bij vermoeide en geïrriteerde ogen. Door het aanbrengen van enkele druppels in het oog, wordt het onprettige gevoel verzacht of volledig gereduceerd.

The Comfort Club PINEAPPLE Hydraclair kan zonder beperkingen worden gebruikt en wordt goed verdragen. Het product blijft goed tot twee maanden na opening van de fles. Houdbaarheid van de ongeopende fles: zie symbool houdbaarheid op het label.

## MEDISCH HULPMIDDEL

Lees de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club PINEAPPLE in combinatie met uw contact lenzen.

## SAMENSTELLING

Werkzame stof: Dexpanthenol 2%, Hydraflex 0,5%.

Conserveermiddel: polyhexanide 0,0001%.

## TOEPASSING

Deze op provitamine B5 gebaseerde oogdruppels verminderen oogirritatie veroorzaakt door externe invloeden, zoals droge lucht en/of airconditioning, tabaksrook, stof en pollen. Tevens kan The Comfort Club PINEAPPLE Hydraclair worden toegepast vóór het inbrengen van de contactlenzen (hard en zacht).

## VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer of de garantiesluiting ongeschonden is.

Was en droog uw handen.

Neem de beschermdop van het flesje en houd uw hoofd iets achterover.

Gebruik uw duim en vinger om uw oog open te houden.

Druk voorzichtig 1 of 2 druppels op het oogoppervlak en knipper 2 of 3 keer.

Herhaal dit proces bij het andere oog.

Knipper een aantal keer met uw ogen, zodat de oogdruppels zich verspreiden in uw oog.

De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen.

De flacon na gebruik direct sluiten.

Ten behoeve van het inbrengen kan The Comfort Club PINEAPPLE Hydraclair direct worden toegepast op contactlenzen.

Knipper daarna een aantal keer met uw ogen, zodat de oogdruppels zich verspreiden in uw oog.

## WAARSCHUWINGEN

Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is.

Na het aanbrengen van de druppels dient er rekening te worden gehouden met tijdelijke verandering van het gezichtsvermogen.

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

## NIET GEBRUIKEN

Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof.

Niet gebruiken bij infectie aan de ogen.

In geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten The Comfort Club PINEAPPLE Hydraclair niet gebruiken.

In geval van oogirritatie staak het gebruik en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist.

## BEWAREN

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaren in de originele verpakking.

Na openen 2 maanden houdbaar.



Ote Pharma Sol BV  
Vluchtoord 38  
NL- 5406 XP Uden

01REF1979  
07/2021

