



The Comfort Club®

voor gebruik met **alle** contactlenzen

YELLOW



40ML

REINIGINGSVLOEISTOF

THE COMFORT CLUB YELLOW REINIGINGSVLOEISTOF VOOR REINIGEN VAN ALLE CONTACTLENZEN.

MEDISCH HULPMIDDEL

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor het juiste gebruik van The Comfort Club YELLOW.

SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: niet-ionogene reinigende bestanddelen. Conserveermiddel: PHMB 0,002 %.

VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZING Was zorgvuldig uw handen voordat u uw lenzen uit de ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek. De garantiesluiting van de flacon wordt verbroken door de dop los te draaien. Direct na het uitnemen van de lenzen deze reinigen met enkele druppels The Comfort Club YELLOW. Reinig de lenzen door deze zacht met de wijsvinger in de palm van de andere hand gedurende 30 seconden te masseren. Spoel vervolgens beide zijden van de lens met een alles-in-1 vloeistof. Hierna kunt u de met een alles-in-1 vloeistof bevochtigde lenzen inzetten. De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeistof te voorkomen. De flacon na gebruik direct sluiten. **WAARSCHUWINGEN** Niet gebruiken indien de garantiesluiting gebroken is. Nooit de lenzen direct uit de The Comfort Club YELLOW in de ogen zetten, zonder te spoelen, zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Gebruik of meng The Comfort Club YELLOW niet met andere contactlensvloeistoffen, tenzij dit is aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Eenmaal gebruikte contactlensvloeistof in de lenshouder niet hergebruiken. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Wijzig alleen van contactlensverzorgingssysteem na goedkeuring van uw arts/contactlensspecialist. Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor deze contactlensvloeistof. De flacon goed schudden voor gebruik. **NIET GEBRUIKEN** Raadpleeg uw oogarts/contactlensspecialist over het gebruik van voorgeschreven oogmedicatie in combinatie met deze contactlensvloeistof. Staak in geval van oogirritatie het gebruik van de contactlensvloeistof en raadpleeg uw arts/contactlensspecialist. **BEWAREN** Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren in de originele verpakking. Na openen 3 maanden houdbaar. **BIJWERKINGEN** Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen The Comfort Club YELLOW niet gebruiken.

INHOUD 40 ml



Ote Pharma Sol BV
Vluchtoord 38
NL- 5406 XP Uden
02REF058000402
05/2021

LOT



Zie onderzijde
van de fles

CE
0344



8