



PATIËNTENBROCHURE

NaturalVue (etafilcon A) zachte (hydrofiele) wegwerpdaglenzen

LET OP: VERKOOP VAN DIT PRODUCT DOOR OF IN OPDRACHT VAN EEN BEVOEGDE ZORGVERLENER

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	2
BEPERKINGEN EN INDICATIES VOOR HET DRAGEN VAN DE LENZEN	2
CONTRA-INDICATIES (REDENEN OM NIET TE GEBRUIKEN).....	3
WAARSCHUWINGEN.....	3
VOORZORGSMaatregelen	4
BIJWERKINGEN (PROBLEMEN EN WAT U ERAAN KUNT DOEN)	5
PERSOONLIJKE HYGIËNE EN HANTERING VAN DE LENS	6
DE LENS VOORBEREIDEN OP HET AANBRENGEN.....	6
DE LENZEN HANTEREN	7
DE LENS AANBRENGEN OP HET OOG	7
DE LENS CENTREREN	8
DE LENS VERWIJDEREN	8
NIET-TOEPASSELIJKE MARKTEN.....	8

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw keuze voor de NaturalVue (etafilcon A) zachte (hydrofiele) wegwerpdaglenzen met uv-filter. Uw NaturalVue (etafilcon A) contactlenzen zijn gemaakt van etafilcon A met een gewichtspercentage water van 58%.

Lees deze patiëntenbrochure aandachtig door. U vindt hierin informatie die u moet weten om uw NaturalVue (etafilcon A) contactlenzen te dragen, te hanteren en te verzorgen. Het is voor uw veiligheid van essentieel belang dat u de informatie in de brochure leest en begrijpt en dat u al uw vragen laat beantwoorden door uw oogzorgspecialist. Bewaar deze brochure voor toekomstig gebruik.

Uw NaturalVue (etafilcon A) contactlenzen zijn hulpmiddelen voor eenmalig gebruik en na verwijdering moeten ze worden weggegooid en vervangen door een nieuw steriel paar lenzen. Uw lenzen zijn niet bedoeld om gereinigd en gedesinfecteerd te worden. U moet altijd een reservepaar lenzen bij u dragen. Als u vragen hebt, stel die dan altijd aan uw oogzorgspecialist.

Voor de gezondheid van uw ogen is het belangrijk om uw lenzen te dragen zoals voorgeschreven door uw oogzorgspecialist. Uw oogzorgspecialist moet volledig op de hoogte worden gebracht van uw medische voorgeschiedenis. Uw oogzorgspecialist zal een compleet zorgprogramma op maat samenstellen op basis van uw specifieke behoeften. Hij of zij zal alle instructies voor het hanteren van de lens met u doornemen, inclusief hoe u de verpakking veilig en gemakkelijk kunt openen. U krijgt instructies over hoe u de lenzen op de juiste wijze inbrengt en verwijdt. Deze instructies komen terug in deze brochure. Gooi uw contactlenzen weg en vervang ze door een nieuw steriel paar lenzen, zoals voorgeschreven door uw oogzorgspecialist.

BEPERKINGEN EN INDICATIES VOOR HET DRAGEN VAN DE LENZEN

NaturalVue (etafilcon A) enhanced multifocale (hydrofiele) wegwerpdaglenzen zijn geïndiceerd voor dagelijks gebruik voor het corrigeren van refractieve ametropie (myopie en hypermetropie) en/of presbyopie, en voor het beheersen van myopieprogressie bij afakische en/of niet-afakische personen met niet-aangetaste ogen met een sterkte van +20,00 tot -20,00 dioptrie en met niet-aangetaste ogen die een bijkomende plussterkte van maximaal +3,00 D nodig kunnen hebben. De momenteel beschikbare sterktewaarden zijn +4,00 tot -12,25 D. De lenzen zijn geschikt voor personen met astigmatisme van maximaal 2,00 dioptrie die de gezichtsscherpte niet verstoort.

NaturalVue (etafilcon A) zachte (hydrofiele) wegwerpdaglenzen helpen voorkomen dat schadelijke uv-straling door het hoornvlies in het oog terechtkomt.

De lenzen zijn ervoor bedoeld om na eenmalig gebruik te worden weggegooid. De lenzen moeten worden weggegooid nadat ze uit het oog zijn verwijderd. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat er een verhoogd risico is op ongewenste voorvallen bij zachte contactlenzen die opnieuw worden gebruikt in vergelijking met lenzen die na elk gebruik worden weggegooid.

DRAAG UW CONTACTLENZEN NIET TIJDENS HET SLAPEN.

CONTRA-INDICATIES (REDENEN OM NIET TE GEBRUIKEN)

GEBRUIK uw contactlenzen **NIET** als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

- Acute en subacute ontsteking of infectie van de voorste oogkamer.
- Oogaandoeningen, -letsels of -afwijkingen die het hoornvlies, de conjunctiva of de oogleden aantasten.
- Een zeer gebrekkige lacrimale secretie (droge ogen).
- Cornea hypo-esthesie (verminderde corneagevoeligheid).
- Elke systemische aandoening die uw oog kan aantasten of kan worden verergerd door het dragen van contactlenzen.
- Allergische reacties van oogoppervlakken of adnexa (omliggend weefsel) die kunnen zijn veroorzaakt of worden verergerd door het dragen van contactlenzen.
- Een actieve cornea-infectie (bacterieel, schimmel- of viraal).
- Als uw ogen rood worden of geïrriteerd raken.
- Gebruik van medicatie die gecontra-indiceerd is of het dragen van uw contactlenzen belemmert, inclusief oogmedicatie.
- Een allergie voor een van de bestanddelen van het contactlensmateriaal.
- Een voorgeschiedenis van terugkerende oog- of ooglidinfecties, bijwerkingen die verband houden met het dragen van uw contactlenzen, intolerantie voor of een ongewone reactie op het dragen van uw contactlenzen.
- U bent niet in staat of niet bereid om de aanwijzingen van de oogzorgspecialist voor het verwijderen en afvoeren van uw lenzen op te volgen of niet in staat dit met hulp te doen.

WAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen maken deel uit van de adviezen die u krijgt over het dragen van uw contactlenzen:

- Problemen met uw contactlenzen kunnen leiden tot ernstig oogletsel. Het is van essentieel belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle instructies voor gebruik op de etikettering opvolgt.
- Oogproblemen, waaronder een zweer of laesie op het hoornvlies (cornea-ulcera), kunnen zich snel ontwikkelen en tot een verminderd gezichtsvermogen leiden.
- Het risico op een geïnfecteerde wond of laesie op het hoornvlies (ulceratieve keratitis) is groter voor mensen die langdurig contactlenzen dragen dan voor mensen die lenzen dragen voor dagelijks gebruik.
- Indien gebruikers van daglenzen de lenzen 's nachts (buiten het goedgekeurde gebruik) inhouden, is het risico op een geïnfecteerde zweer of laesie op het hoornvlies (ulceratieve keratitis) groter dan wanneer de lenzen niet worden ingehouden tijdens het slapen.
- Het risico op ulceratieve keratitis bij contactlensgebruikers die roken is groter dan bij niet-rokers.
- Als u ongemak ervaart aan de ogen of last krijgt van overmatige traanvorming, veranderingen in het gezichtsvermogen of roodheid van het oog, of van andere problemen, moet u de lenzen direct verwijderen en onmiddellijk contact opnemen met uw oogzorgspecialist. U wordt geadviseerd om regelmatig een bezoek te brengen aan uw oogzorgspecialist, zoals u is voorgeschreven.

WAARSCHUWING:

Uv-absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor een beschermende uv-absorberende bril, zoals een uv-absorberende veiligheidsbril of een zonnebril, omdat ze het oog en het omliggende gebied niet volledig bedekken. U dient nog steeds een uv-absorberende bril te dragen, zoals voorgeschreven.

OPMERKING: Langdurige blootstelling aan uv-straling maakt deel uit van de risicofactoren die in verband worden gebracht met cataracten. Deze blootstelling is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld omgevingsomstandigheden (hoogteligging, geografie, wolkendek) en persoonlijke factoren (omvang en aard van buitenactiviteiten). Uv-absorberende contactlenzen bieden bescherming tegen schadelijke uv-straling. Er zijn echter geen klinische onderzoeken uitgevoerd om aan te tonen dat het dragen van uv-absorberende contactlenzen het risico op het ontwikkelen van staar of andere oogandoeningen verkleint. Raadpleeg uw oogzorgspecialist voor meer informatie.

VOORZORGSMAATREGELEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor uw oogzorgspecialist:

- Door het kleine aantal patiënten dat deelneemt aan klinisch onderzoek van lenzen, worden alle refractieve sterktes, ontwerpconfiguraties of lensparameters die beschikbaar zijn in het lensmateriaal niet in significante aantallen geëvalueerd. Als gevolg hiervan moet uw oogzorgspecialist bij het selecteren van een geschikt lensontwerp en parameters rekening houden met alle kenmerken van de lens die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de lens en de gezondheid van de ogen, waaronder zuurstofdoorlatendheid, bevochtigingsvermogen, centrale en perifere dikte en diameter van de optische zone. De mogelijke impact van deze factoren op de gezondheid van uw ogen moet zorgvuldig worden afgewogen tegen uw behoefte aan refractieve correctie. Dit betekent dat de gezondheid van uw ogen en de werking van de lens op het oog voortdurend nauwgezet moeten worden gecontroleerd door uw oogzorgspecialist.
- Voordat u het filiaal van uw oogzorgspecialist verlaat moet u in staat zijn om de lenzen snel zelf te verwijderen of moet u iemand anders in de buurt hebben die de lenzen voor u kan verwijderen.
- De oogzorgspecialist moet u instrueren om de lenzen onmiddellijk te verwijderen als uw ogen rood worden of geïrriteerd raken.

Uw oogzorgspecialist moet u op het volgende wijzen:

- Als de lens op uw oog blijft plakken (niet meer beweegt), moet u de aanbevolen aanwijzingen opvolgen. Om de gezondheid van uw oog te waarborgen moet de lens vloeiend over uw oog kunnen bewegen. Als de onbeweeglijke toestand van uw lens aanhoudt, moet u onmiddellijk uw oogzorgspecialist raadplegen.
- Was uw handen en spoel en droog ze altijd goed af voordat u uw lenzen met uw handen aanraakt. Laat geen cosmetica, lotions, zeep, crèmes, deodorants, aerosolproducten of haarsprays in uw ogen of op uw lenzen komen. Het is het beste om uw lenzen in te doen voordat u make-up opdoet. Cosmetica op waterbasis beschadigen lenzen minder snel dan producten op oliebasis.
- Raak contactlenzen niet met uw vingers of handen aan als de handen niet vrij zijn van vreemde stoffen, omdat hierdoor microscopische krasjes kunnen ontstaan op uw lenzen, met een vervormd zicht of oogletsel tot gevolg.
- Blootstelling aan water tijdens het dragen van contactlenzen bij het uitoefenen van activiteiten zoals zwemmen of waterskiën, of in een hottub of bubbelbad zitten, kan het risico op een ooginfectie vergroten. Leg uw vragen over het dragen van contactlenzen tijdens sportactiviteiten voor aan uw oogzorgspecialist.

- Draag uw lenzen nooit langer dan de periode die wordt aanbevolen door uw oogzorgspecialist.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van aerosolproducten zoals haarspray tijdens het dragen van uw lenzen; houd uw ogen dicht totdat de spray is neergeslagen.
- Hanteer uw lenzen altijd voorzichtig en laat ze niet vallen.
- Vermijd elke vorm van schadelijke of irriterende dampen en rook tijdens het dragen van uw lenzen.
- Gebruik nooit een pincet of ander gereedschap om uw lenzen uit hun blisterverpakking te halen, tenzij het een specifiek voor dit gebruik aangewezen gereedschap betreft. Laat de lens in uw handpalm glijden.
- Raak de lens niet aan met uw vingernagels.
- Gooi uw lenzen altijd weg na afloop van het aanbevolen draagschema dat door uw oogzorgspecialist is voorgeschreven. Omdat deze lenzen daglenzen zijn (voor eenmalig gebruik), moeten ze na verwijdering uit het oog worden weggegooid.
- Neem altijd contact op met uw oogzorgspecialist voordat u een geneesmiddel in uw ogen aanbrengt.
- Stel altijd uw werkgever op de hoogte van het feit dat u contactlenzen draagt. Bij sommige beroepen kan het gebruik van oogbeschermingsmiddelen noodzakelijk zijn of is het zelfs nodig dat u geen contactlenzen draagt.
- Zoals bij elke contactlens zijn vervolfbezoeken nodig om de gezondheid van uw ogen te waarborgen. U moet worden geïnstrueerd om een aanbevolen schema voor vervolfbezoeken te volgen.
- U mag nooit het voorgeschreven draagschema overschrijden, ongeacht hoe comfortabel uw lenzen aanvoelen. Dit vergroot namelijk het risico op bijwerkingen.
- Gebruik uw lenzen niet na de uiterste gebruiksdatum.
- Bepaalde geneesmiddelen kunnen ertoe leiden dat u droge ogen krijgt, dat u zich bewust wordt van de aanwezigheid van de lens, dat u de lens niet meer goed verdraagt of dat u wazig gaat zien of uw zicht op een andere manier verandert.
- Als u een oraal anticonceptiemiddel gebruikt, kunt u bij het gebruik van lenzen een verandering in het gezichtsvermogen of de tolerantie voor de lens ontwikkelen.
- Niet gebruiken als de steriele blisterverpakking geopend of beschadigd is.
- Laat nooit iemand anders uw lenzen dragen. Ze zijn specifiek voorgeschreven voor uw ogen, om de voor u benodigde zichtcorrectie te bieden. Het delen van lenzen vergroot de kans op ooginfecties aanzienlijk.

BIJWERKINGEN (PROBLEMEN EN WAT U ERAAN KUNT DOEN)

U moet worden geïnformeerd dat de volgende problemen kunnen optreden bij het dragen van contactlenzen:

- Een stekend, brandend of jeukend gevoel in het oog (irritatie) of andere soort pijn in het oog.
- Een verminderd comfort vergeleken met het moment waarop de lens voor het eerst op uw oog werd aangebracht.
- Het gevoel dat er iets in uw oog zit (vreemd voorwerp, bekrast oppervlak).
- Overmatige vochtvorming (in de vorm van tranen) uit uw ogen.
- Ongewone uitscheiding uit het oog.
- Roodheid van uw ogen.
- Verminderde scherpte van uw gezichtsvermogen (slechte gezichtsscherpte).
- Wazig zien, regenbogen of halo's rond voorwerpen.
- Gevoeligheid voor licht (fotofobie).
- Een droog gevoel.
- Vreemdvoorwerpsensatie.

Als u een van bovenstaande zaken opmerkt, zult u de volgende instructies krijgen:

- Verwijder uw lenzen onmiddellijk.
 - Kijk goed naar uw lens. Als uw lens op enigerlei wijze beschadigd is, plaats uw lens dan niet terug op uw oog. Als er vuil, een wimper of een ander vreemd voorwerp op uw lens zit, moet u de lens eerst grondig reinigen en afspoelen voordat u hem weer inbrengt.
- Als het probleem na het opnieuw inbrengen aanhoudt, moet u de lens onmiddellijk verwijderen en uw oogzorgspecialist raadplegen.
- Als de bovenstaande symptomen aanhouden na het verwijderen van uw lens of na het inbrengen van een nieuwe lens, moet u uw lens onmiddellijk verwijderen en contact opnemen met uw oogzorgspecialist.
 - Uw oogzorgspecialist onderzoekt uw ogen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een ernstige aandoening zoals een infectie, cornea-ulcera, neovascularisatie of iritis.

Belangrijke informatie over de behandeling van bijwerkingen

Zichtbedreigende oogcomplicaties in verband met het dragen van contactlenzen kunnen zich snel ontwikkelen en daarom is een vroegtijdige herkenning en behandeling van problemen van cruciaal belang. Infectieuze cornea-ulcera behoren tot de meest ernstige complicaties die kunnen optreden en zijn in een vroeg stadium mogelijk lastig te herkennen. Teken en symptomen van infectieuze cornea-ulcera zijn ongemak, pijn, ontsteking, purulente afscheiding, gevoeligheid voor licht, aanwezigheid van ontstekingscellen en 'flare' en cornea-infiltraten.

De eerste symptomen van een lichte schaafllek en een geïnfecteerd ulcus in een vroeg stadium zijn soms vergelijkbaar. Dientengevolge kunnen dergelijke epitheeldefecten, indien niet correct behandeld, zich ontwikkelen tot een geïnfecteerd ulcus. Om ernstige progressie van deze aandoeningen te voorkomen, moet u wanneer u last krijgt van symptomen van schaafllekken of vroege ulcera worden beoordeeld als een mogelijk medisch spoedgeval, dienovereenkomstig worden behandeld en, indien van toepassing, worden doorverwezen naar een corneaspecialist. Standaardtherapie voor geschaafd hoornvlies, zoals ooglapjes of het gebruik van steroïden of combinaties van steroïden en antibiotica, kan de aandoening verergeren. Als u bij onderzoek een contactlens op het aangetaste oog draagt, moet uw lens onmiddellijk worden verwijderd.

PERSOONLIJKE HYGIËNE EN HANTERING VAN DE LENS

DE LENS VOORBEREIDEN OP HET AANBRENGEN

Het is van essentieel belang dat u zich goede hygiënische gewoonten aanleert en deze gebruikt bij de verzorging en hantering van uw nieuwe lenzen. Een goede hygiëne is het primaire en belangrijkste aspect van de juiste verzorging van contactlenzen. Uw handen moeten schoon zijn en vrij van vreemde stoffen wanneer u uw lenzen hanteert. De procedure is als volgt:

- Was uw handen altijd grondig met milde zeep, spoel ze volledig af en droog ze af met een pluisvrije handdoek voordat u uw lenzen aanraakt.
- Vermijd het gebruik van zeep die koude crème, lotion of vette cosmetica bevat voordat u uw lenzen hanteert, omdat deze stoffen in aanraking kunnen komen met uw lenzen en een succesvol gebruik in het oog in de weg kunnen staan.
- Hanteer uw lenzen met uw vingertoppen en vermijd contact met uw vingernagels. Het is handig om uw vingernagels kort en glad te houden.


Ga meteen goed van start door de gewoonte aan te leren om altijd de juiste hygiënische procedures toe te passen, zodat ze een automatisme worden.

DE LENZEN HANTEREN


- Maak er een gewoonte van om altijd met dezelfde lens te beginnen zodat u ze niet per ongeluk verwisselt.

- Neem uw lens uit de blisterverpakking en onderzoek hem om er zeker van te zijn dat hij vochtig, schoon, doorzichtig en vrij van inkepingen of scheuren is.

Controleer of de lens met de goede kant naar buiten is gericht. Plaats uw lens op uw rechterwijsvinger en controleer of de oriëntatie correct is (zie afbeelding 1 en 2). Uw lens moet een natuurlijke, gebogen komvorm aannemen (afbeelding 1). Als de randen van uw lens naar buiten wijzen (afbeelding 2), is de lens binnenstebuiten gekeerd.

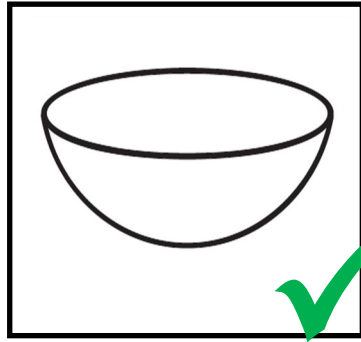

Afbeelding 1

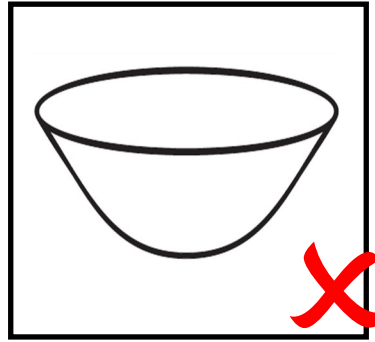

Afbeelding 2

DE LENS AANBRENGEN OP HET OOG

Maak er een gewoonte van om steeds één van de lenzen als eerste in te brengen om verwarring te voorkomen. Controleer of uw lens schoon en vochtig is. Controleer of uw lens niet binnenstebuiten is gekeerd. Volg vervolgens deze stappen om uw lens op uw oog aan te brengen:

- Breng de lens in balans op de punt van uw wijsvinger.
- Trek met de middelvinger van dezelfde hand uw onderste ooglid omlaag.
- Houd met de middelvinger van uw andere hand uw bovenste ooglid van bovenaf goed in positie. Zorg dat u uw vinger precies op de plek houdt waar de wimpers uit uw ooglid tevoorschijn komen.
- Uw oog is nu wijd open en het hoornvlies ligt bloot.
- Plaats uw lens rechtstreeks op uw oog. Beweeg uw ogen om uw lens te helpen zich te centreren.
- Laat uw onderste en vervolgens uw bovenste ooglid los. Kijk naar beneden en sluit de ogen voorzichtig. Wrijf lichtjes over uw bovenste ooglid om eventuele luchtbelletjes eruit te wrijven.
- Als uw lens niet goed op het hoornvlies is gecentreerd, manipuleer hem dan voorzichtig met uw vingertoppen en oogleden.

Er zijn ook andere methoden voor het aanbrengen van lenzen. Als u moeite hebt met de methode hierboven, zal uw oogzorgspecialist u een alternatieve methode bieden.

OPMERKING: Indien u na het aanbrengen van uw lens wazig ziet, controleer dan of zich het volgende heeft voorgedaan:

- Uw lens is niet gecentreerd op uw oog (zie 'De lens centreren', de volgende paragraaf van deze brochure).
- Als uw lens gecentreerd is, verwijdert u uw lens (zie de paragraaf 'De lens verwijderen') en controleert u het volgende:
 - a. Er zit cosmetica of olie op uw lens. Gooi uw lens weg en breng een nieuwe verse lens aan.
 - b. Uw lens zit op het verkeerde oog.
 - c. Uw lens is binnenstebuiten gekeerd (dit kan ook minder comfortabel zijn dan normaal).

Als u merkt dat u nog steeds wazig ziet nadat u de bovenstaande mogelijkheden hebt gecontroleerd, verwijder dan uw lenzen en raadpleeg uw oogzorgspecialist.

DE LENS CENTREREN

In zeer zeldzame gevallen verplaatst een lens die is aangebracht op het hoornvlies zich richting het witte deel van uw oog. Dit kan ook gebeuren tijdens het plaatsen en verwijderen van uw lenzen als de juiste technieken niet correct worden uitgevoerd. Volg een van de onderstaande procedures om uw lens te centreren:

- Sluit uw oogleden en masseer uw lens voorzichtig, terwijl u uw oogleden gesloten houdt, op zijn plaats.

OF

- Manoeuvreeer de niet-gecentreerde lens voorzichtig, terwijl u het oog openhoudt, met lichte druk van uw vinger op de rand van het bovenste of onderste ooglid, over het hoornvlies.

DE LENS VERWIJDEREN


Verwijder steeds dezelfde lens als eerste.

- Was, spoel en droog uw handen grondig.
- Vooral als een lens een beetje droog is, kunt u deze weer vochtig maken met een paar druppels vloeistof om de lens van het oog te laten glijden.
- Plaats uw wijsvinger op uw lens.
- Kijk omhoog.
- Schuif de lens met uw wijsvinger naar het witte deel van uw oog.
- Neem uw lens tussen duim en wijsvinger en knijp er voorzichtig in om hem te verwijderen.
- Verwijder de andere lens volgens dezelfde procedure.
- Wegwerpdaglenzen (voor eenmalig gebruik) worden elke dag nadat u ze uit uw ogen hebt verwijderd, weggegooid.

OPMERKING: Als u moeite hebt met deze manier van verwijdering van uw lens, zal uw oogzorgspecialist u een alternatieve methode bieden.

NIET-TOEPASSELIJKE MARKTEN

Dit document is NIET van toepassing op NaturalVue producten die worden verkocht in Australië, Nieuw-Zeeland of de Verenigde Staten van Amerika.

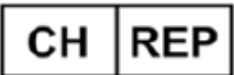	Geproduceerd door: Vioneering Technologies, Inc. 30 Mansell Court, Suite 215 Alpharetta, GA 30076 VS Tel: 00-1-844-884-5367 x102 www.vtvision.com
	Emergo Europa Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Nederland
	CE-markering voor aangemelde instantie nr. 0123
Lokale verantwoordelijke (Hongkong)	Emergo Hongkong Limited 6/F, 100QRC 100 Queen's Road Central Hongkong
	MedEnvoy Zwitserland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Zwitserland

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Batchcode
	Gemachtigde in de Europese Gemeenschap
	CE-markering, geeft aan dat het product is goedgekeurd voor verkoop in de Europese Gemeenschap
	Gesteriliseerd met stoom of droge hitte

SYMBOOL	BESCHRIJVING
	Uiterste gebruiksdatum Vermeld als: CCJJ-MM of CCJJ-MM-DD CCJJ-MM
	Verkoop van dit hulpmiddel dient door of in opdracht van een bevoegde zorgverlener plaats te vinden.
	Uv-filter (Geeft aan dat de lens uv blokkeert)
B.C.	Basiscurve (producteigenschap)
D	Dioptrie (lenssterkte, producteigenschap)
DIA.	Diameter (producteigenschap)
	Niet opnieuw gebruiken
	Niet opnieuw steriliseren
	Fabrikant
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
ADD	Plus-sterkte

Herzieningsdatum: december 2023